


Рекомендации по уходу
за контактными линзами
с многофункциональными
растворами **CooperVision®**

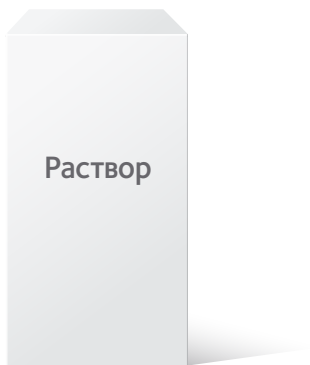


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Когда вы снимаете линзы:



Шаг 1. Очистка.

Тщательно вымойте руки и вытрите их сухим безворсовым полотенцем

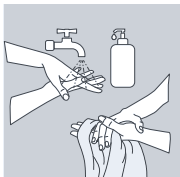





Шаг 2. Промывание.

Промойте линзы раствором, аккуратно потрите 15-20 с кончиком пальца

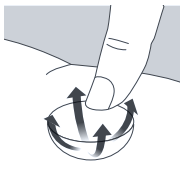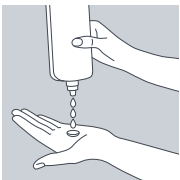

Шаг 3. Дезинфекция.



Ополосните линзы еще раз свежим раствором и поместите в контейнер. Наполните контейнер свежим раствором почти до края, чтобы скрыть линзы. Плотно закройте крышки контейнера и раствора. Оставьте линзы в растворе, не вынимая их, по крайней мере на 4 ч или на всю ночь

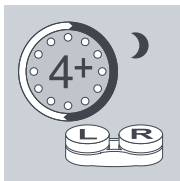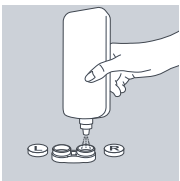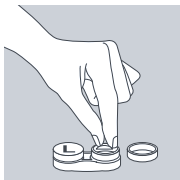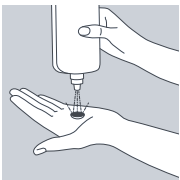

Когда вы надеваете линзы:

Шаг 1. Комфорт при ношении линз.

Тщательно вымойте руки и вытрите их сухим безворсовым полотенцем. Достаньте линзы из контейнера, проверив их целостность и правильность положения «лицо/изнанка». Для большего комфорта можете капнуть немного раствора на линзу перед надеванием.

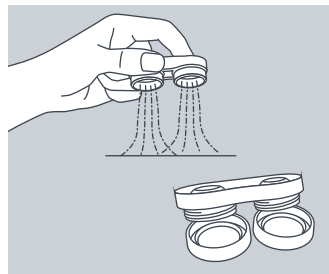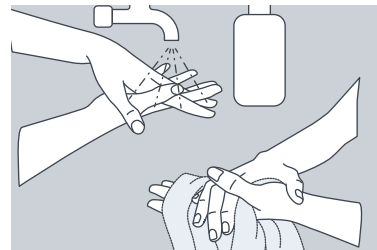

Шаг 2. Уход за контейнером.


Влейте из контейнера весь использованный раствор, ополосните контейнер свежим раствором и оставьте его сушиться вверх дном

CooperVision®

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

При использовании многофункционального раствора помните:

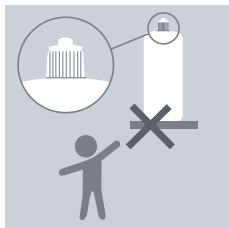


Храните раствор в недоступном для детей месте.

Плотно закрывайте крышку флакона после каждого использования. Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.



Не используйте раствор повторно. При хранении линзы в растворе более 7 дней рекомендуется повторить процедуру дезинфекции.

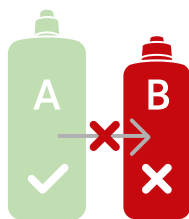

Не меняйте раствор без рекомендации специалиста.

№ РУ XXX 0000/0000 от 00.00.0000

Материал не является инструкцией по применению, необходимо ознакомиться с официальной инструкцией, размещенной на сайте www.cooper-vision.ru в разделе «Инструкции по применению».

CooperVision®

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.